
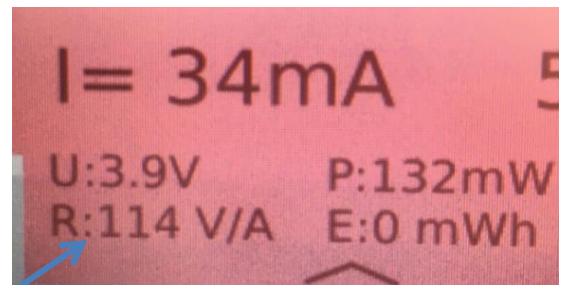


Überprüfung des Widerstandes der Elektroden

Auszug aus der Bedienungsanleitung:

HiToP[®] 1touch, HiToP[®] 2touch, HiToP[®] 4touch, HiToP[®] 184, HiToP[®] 142, HiToP[®] 182

Zur Überprüfung des Widerstandes legen Sie bitte 2 Elektroden aufeinander und verbinden sie jeweils mit einem schwarzen und einem weißen Stecker der Patientenleitungen. Drücken Sie die Elektroden zusammen. Stellen Sie SimulFAM i am Gerät ein und erhöhen Sie den Strom mit dem Intensitätsregler. Der angezeigte Widerstand (R=) sollte 300 Ohm nicht überschreiten

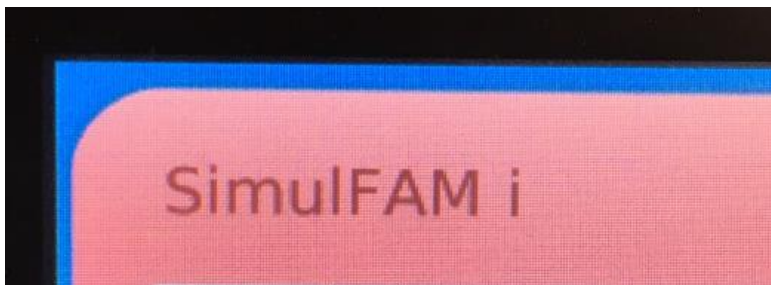

Der Widerstand Ihrer Elektroden sollte 300 Ohm nicht überschreiten, überprüfen Sie es ganz einfach selbst!